

Medicon Village
Byggnad 402A, vån 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund
Telefon: 046-173195

BIOLOGISKA PROV, Krom VI

- Kunden ansvarar för att senaste version av remiss används, se **Remisser och provtagningsanvisningar**
- Vid provinsändelse accepterar kunden **AMMs kundvillkor**, <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm>

Fylls i av laboratoriet:
Remissid, ankomstdatum:

Personnummer, namn:		<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt
Exponering för:		
Patientens/arbetstagarens arbetsställe (Namn, Ort)	Provtagare:.....	Telefonnr (direktnr):
Beställare (AMMs kundkod ^a).....	Fakturareferens ^b :	
Svarsmottagare (attention):.....		
Telefonnr (direktnr):		

^a Vid avsaknad av AMMs kundkod kontakta laboratoriet. Se remissens baksida för kontaktuppgifter.

^b Frivillig att fylla i.

Analys (kontakta laboratoriet om förväntad svarstid)

(Provsvar skickas inom 20 arbetsdagar från det att provet anlänt till lab)

<p>Metaller i blod</p> <p><input type="checkbox"/> B-kromVI (CrVI)</p>

Övriga upplysningar:

Blod (provtagningsstid)	Provmärkning (frivillig)
Datum:kl:.....	
Provolym:.....ml	
Övriga noteringar:	

Anvisningar, se remissens baksida.

REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR

Remisser

Remisser för biologiska prov (för standard- och specialsортiment) finns att ladda ner från <http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/>. Remisser och provtagningskärl kan också beställas från Arbets- och miljömedicin Syd via ett beställningsformulär på hemsidan <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/bestallning-av-provtagningsmaterial/>. För att korrekt bedömning av resultatet ska kunna genomföras är det viktigt att alla uppgifter fylls i.

Kundkod

Om det är första gången du ska beställa analyser kontakta då oss för att se om du kan bli kund och få en kundkod. Skicka ett mail till ammlab@skane.se (skriv "kundkod" i ämnesraden). Kundkoden ska anges på pappersremissen vid beställning av analyser.

Provtagning

Om patienten kommer direkt från arbetet tvättas armvecket först med tvål och vatten. Fyll två rör, 2-4 ml, som innehåller antikoagulationsmedel utan gel, t ex natriumheparinrör. Minsta provvolym 2,5 mL. Det är viktigt att undvika hemolys. Endast hemolysfria prover analyseras.. *Omedelbart efter provtagning vänds rören minst 10 ggr för att åstadkomma jämn fördelning av antikoagulationsmedlet. Centrifugera ej provet.*

Kapillärprovtagning medför större mätosäkerhet än venprovtagning eftersom den kan leda till varierande grad av hemolys. Detta kan leda till falskt höga eller falskt låga analysresultat. Kapillärprovtagning bör därför undvikas.

Att tänka på för att undvika hemolys

Hemolys innebär att röda blodkroppar går sönder så att blodkroppsinnehållet läcker ut i serum/plasma.

För att minska risken för hemolys vid venprovtagning:

- Låt huden lufttorka innan provtagningen påbörjas.
- Kanyl anpassas efter kärlstorlek. Tunn kanyl i kärl med stort flöde kan orsaka hemolys.
- Undvik provtagning via PVK. Röda blodkroppar går sönder i PVK-kammaren.
- Om röret fylls fort (skummar i röret) - ändra rörens lutning så att strålen träffar rörväggen.
- Om röret fylls långsamt - försök öka flödet genom att försiktigt ändra nålens läge.
- Låt prov svalna några minuter före transport i rörpost.
- Låt prover svalna före förvaring i kyla. Kondens rinner ner i blodet och medför hemolys.

Förvaring och transport

Hållbarhet 2 dygn i kyl. OBS! Fry INTE proverna

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet. Proverna måste vara laboratoriet tillhanda senast 2 dygn efter provtagning.

Prover ska skickas kylda. Proverna packas i transporthylsor och läggs i frigolitlåda alternativt i vadderat kuvert tillsammans med frusen kylklamp inlindad i pappershanddukar.

Remisserna läggs i ett kuvert inuti paket.

Var noga så att proverna inte ligger i direkt kontakt med kylklampen, då risken är att proverna iså fall fryser.

Paketet adresseras till: Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Byggnad 402 A, våning 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Prov kasseras två veckor efter utskick av analysvar.