

Medicon Village  
Byggnad 402A, vån 3  
Scheelevägen 8  
223 81 Lund  
Telefon: 046-173195

**BIOLOGISKA PROV, standardsortiment samlingsremiss**

- Kontakta laboratoriet innan provtagning för beställning av provtagningsmaterial för **urinalyser**.
- Kunden ansvarar för att senaste version av remiss används, se **Remisser och provtagningsanvisningar** sid 3
- Vid provinsändelse accepterar kunden **AMMs kundvillkor**, <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm>

*Fylls i av laboratoriet:*

Remissid, ankomstdatum:	Prov skickat för kreatininanalys
	Datum:
	Sign:

Exponering för:	<input type="checkbox"/> Medicinsk kontroll
Arbetstagarnas arbetsställe (Namn, Ort):	Provtagare: ..... Telefon (direktnr): ..... Provtagningsdatum: .....
Beställare (AMMs kundkod <sup>a</sup> ) ..... Svarsmottagare (attention): ..... Telefonnr (direktnr): .....	Övrig information <sup>b</sup> :

<sup>a</sup> Vid avsaknad av AMMs kundkod kontakta laboratoriet. Se remissens baksida för kontaktuppgifter.

<sup>b</sup> Frivillig att fylla i.

**Analyser (kontakta laboratoriet om förväntad svarstid)**

\*Analyser ackrediterade av Swedac (Provsvår skickas inom tio arbetsdagar från det att provet anlänt till lab)

<b>Metaller i blod</b>	<b>Metaller i urin</b>	<b>Specifika IgE-antikroppar mot syraanhydrider och isocyanater</b>
<input type="checkbox"/> B-bly (Pb)*	<input type="checkbox"/> U-kadmium (Cd)*	<input type="checkbox"/> S-ftalsyraanhydrid (FA)
<input type="checkbox"/> B-kadmium (Cd)*	<input type="checkbox"/> U-kvicksilver (Hg)*	<input type="checkbox"/> S-hexametylendiisocyanat (HDI)
<input type="checkbox"/> B-kvicksilver (Hg)*	<input type="checkbox"/> U-kobolt (Co)	<input type="checkbox"/> S-metylendifenyldiisocyanat (MDI)
	<input type="checkbox"/> U-krom (Cr)	<input type="checkbox"/> S-toluendiisocyanat (TDI)
	<input type="checkbox"/> U-mangan (Mn)	
	<input type="checkbox"/> U-nickel (Ni)	

**Exponeringsmarkörer i urin<sup>c</sup>**

- U-styrenmetaboliter (mandelsyra+fenyglyoxylsyra)
- U-1-hydroxypyren (1-HP)

<sup>c</sup> Minsta beställningsbara volym är 5 prover

**Anvisningar, se remiss sida 3.**

Provnummer	Personnummer, namn	Noteringar	Remissid (fylls i av laboratoriet)
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		
	<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt		

Övriga anvisningar, se remiss sid 3

## REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR

### Kundkod

Om det är första gången du ska beställa analyser kontakta då oss för att se om du kan bli kund och få en kundkod. Skicka ett mail till [ammlab@skane.se](mailto:ammlab@skane.se) (skriv "kundkod" i ämnesraden). Kundkoden ska anges på pappersremissen vid beställning av analyser.

### Remisser

Remisser för biologiska prov (för standard- och specialsортiment) finns att ladda ner från <http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/>.

För att korrekt bedömning av resultatet ska kunna genomföras är det viktigt att alla uppgifter fylls i.

### Provtagning

#### **Blod (B):**

Om patienten kommer direkt från arbetet tvättas armvecket först med tvål och vatten. 2-4 ml blod tages i blodprovsrör med antikoagulationsmedel utan gel, exempelvis natriumheparinrör. *Omedelbart efter provtagning vänds rören minst 10 ggr för att åstadkomma jämn fördelning av antikoagulationsmedlet. Centrifugera ej provet.*

#### **Serum (S):**

Venblod tages i serumrör med gel (SST-rör) eller i rör utan tillsats. Låt stå 30 minuter. Serum separeras på plats genom centrifugering (1500 × g, 10 min). Minimivoly m 2 ml.

#### **Urin (U):**

Provtagningskärl kan beställas från Arbets- och miljömedicin Syd via ett beställningsformulär på hemsidan <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/bestallning-av-provtagningsmaterial/> eller via mail till [ammlab@skane.se](mailto:ammlab@skane.se)

- **U-metaller:**

Första morgonurinen samlas direkt i specialdiskad mugg. Därefter överförs 2×10 ml till 2 plaströr (13 ml PP-rör, Sarstedt). Under provsamlingen förvaras skruvlocket (med öppningen uppåt) på en ren avläggningsyta. Efter provsamlingen sätts locket tillbaka på röret och skruvas åt hårt för att undvika läckage under transport. Rören ska märkas med namn, personnummer, datum och provtagningstid. Därefter ska rören stoppas i transporthylsa.

- **U-Styrenmetaboliter (Mandelsyra+fenylglyoxysyra) och U-1-HP (Hydroxypyren):**

Urinprov samlas från de fyra sista timmarna av ett arbetsskift: Blåsan töms (urinen kastas) fyra timmar före arbetets slut. Därefter och fram till arbetets slut samlas all urin i en plastflaska som rekvireras från Arbets- och miljömedicin Syd. Från denna plastflaska överförs sedan 2×10 ml urin till 2 st PP-rör och dessa två rör skickas in till AMM Syd. *Om 1-HP ska analyseras ska urinen förvaras mörkt.*

### Transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Paketet adresseras till: Arbets- och miljömedicin Syd, våning 3  
Medicon Village  
Byggnad 402 A  
Scheelevägen 8  
223 81 Lund

Prov kasseras två veckor efter utskick av analysvar.