

Medicon Village
Byggnad 402A, vån 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund
Telefon: 046-173195

BIOLOGISKA PROV, standardsortiment

- Kontakta laboratoriet innan provtagning för beställning av provtagningsmaterial för **urinanalyser**.
- För icke ackrediterade analyser kontakta laboratoriet innan provtagning om förväntad svarstid.
- Kunden ansvarar för att senaste version av remiss används, se **Remisser och provtagningsanvisningar** sid 2
- Vid provinsändelse accepterar kunden **AMMs kundvillkor**, <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm>

Fylls i av laboratoriet:	
Remissid, ankomstdatum:	Prov skickat för kreatininanalys
	Datum:
	Sign:

Personnummer, namn:		<input type="checkbox"/> Patientidentitet ej styrkt
<input type="checkbox"/> Medicinsk kontroll	Exponering för:	
Arbetstagarens arbetsställe (Namn, Ort):	Provtagare:..... Telefonnr (direktnr): Provtagningsdatum:	
Beställare (AMMs kundkod ^a):..... Svaremottagare (attention):..... Telefonnr (direktnr):	Övrig information ^b :	

^a Vid avsaknad av AMMs kundkod kontakta laboratoriet. Se remissens baksida för kontaktuppgifter.

^b Frivillig att fylla i.

Analys

*Analys ackrediterade av Swedac
Provsvaret för ackrediterade analyser skickas inom tio arbetsdagar från det att provet anlänt till lab

För övriga analyser kontakta laboratoriet innan provtagning för information om förväntad svarstid

Metaller i blod	Metaller i urin	Specifika IgE-antikroppar mot syraanhydrider och isocyanater
<input type="checkbox"/> B-bly (Pb)* <input type="checkbox"/> B-kadmium (Cd)* <input type="checkbox"/> B-kvicksilver (Hg)*	<input type="checkbox"/> U-kadmium (Cd)* <input type="checkbox"/> U-kvicksilver (Hg)* <input type="checkbox"/> U-kobolt (Co) <input type="checkbox"/> U-krom (Cr) <input type="checkbox"/> U-mangan (Mn) <input type="checkbox"/> U-nickel (Ni)	<input type="checkbox"/> S-ftalsyraanhydrid (FA) <input type="checkbox"/> S-hexametylendiisocyanat (HDI) <input type="checkbox"/> S-metylendiisocyanat (MDI) <input type="checkbox"/> S-toluendiisocyanat (TDI)

Exponeringsmarkörer i urin^c <input type="checkbox"/> U-1-hydroxypyren (1-HP)	Urin (provsamlingstid) Datum:kl:.....- Datum:kl:..... Provolym:..... ml
---	--

^c Minsta beställningsbara volym är 5 prover.

REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR

Kundkod

Om det är första gången du ska beställa analyser kontakta då oss för att se om du kan bli kund och få en kundkod. Skicka ett mail till ammlab@skane.se (skriv "kundkod" i ämnesraden). Kundkoden ska anges på pappersremissen vid beställning av analyser.

Remisser

Remisser för biologiska prov (för standard- och specialsортiment) finns att ladda ner från

<http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/>.

För att korrekt bedömning av resultatet ska kunna genomföras är det viktigt att alla uppgifter fylls i.

Provtagning

Blod (B):

Om patienten kommer direkt från arbetet tvättas armvecket först med tvål och vatten. 2-4 ml blod tages i blodprovsrör med antikoagulationsmedel utan gel, exempelvis natriumheparinrör. *Omedelbart efter provtagning vänds rören minst 10 ggr för att åstadkomma jämn fördelning av antikoagulationsmedlet. Centrifugera ej provet.*

Serum (S):

Venblod tages i serumrör med gel (SST-rör) eller i rör utan tillsats. Låt stå 30 minuter. Serum separeras på plats genom centrifugering (1500 × g, 10 min). Minimivoly 2 ml.

Urin (U):

Provtagningskärl kan beställas från Arbets- och miljömedicin Syd via ett beställningsformulär på hemsidan

<https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/bestallning-av-provtagningsmaterial/>

- **U-metaller:**

Första morgonurinen samlas direkt i specialdiskad mugg. Därefter överförs 2×10 ml till 2 plaströr (13 ml PP-rör, Sarstedt). Om möjligt använd provrör erhållna från AMM då metallhalten i röret är kontrollerad. Under provsamlingen förvaras skruvlocket (med öppningen uppåt) på en ren avläggningsyta. Efter provsamlingen sätts locket tillbaka på röret och skruvas åt hårt för att undvika läckage under transport. Rören ska märkas med namn, personnummer, datum och provtagningstid. Därefter ska rören stoppas i transporthylsa.

- **U-1-HP (Hydroxypyren):**

Urinprov samlas från de fyra sista timmarna av ett arbetsskift: Blåsan töms (urinen kastas) fyra timmar före arbetets slut. Därefter och fram till arbetets slut samlas all urin i en plastflaska som rekvireras från Arbets- och miljömedicin Syd. Från denna plastflaska överförs sedan 2×10 ml urin till 2 st PP-rör och dessa två rör skickas in till AMM Syd. *Om 1-HP ska analyseras ska urinen förvaras mörkt.*

Transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Paketet adresseras till: Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Byggnad 402 A, våning 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Prov kasseras två veckor efter utskick av analyssvar.